

30
JAHRE
THERALINE

Wir geben Leben Halt
SEIT 1993

THERALINE

Wir geben Leben Halt

Das
Original
THERALINE

GEBRAUCHSANLEITUNG
UND PRODUKTINFORMATIONEN



The background of the page is a soft-focus photograph of a baby being held by a woman. The baby is lying down, and the woman's hands are visible, gently supporting the baby. The overall tone is warm and nurturing. In the lower-left quadrant, there is a graphic illustration of a white pearl resting inside a grey, shell-like structure. The shell is filled with small white beads, and the pearl is the largest one, positioned in the center of the shell's opening.

Wir geben Leben Halt

Wenn Sie unsere Perlenkissen einmal ausprobieren, spüren Sie eines sofort: sie geben Ihnen oder Ihren Lieben Halt, wie kein anderes Kissen. Dabei kommen unsere kleinen Theraline-„Helden“ ganz groß raus: unsere sandfeinen, flüsterleisen Mikroperlen.

Egal ob groß oder klein, schwanger oder stillend oder ob Sie unsere Kissen einfach nur zum Schlafen nehmen, die Theraline-Kissen formen sich dank der frei fließenden, schadstofffreien Perlen immer optimal an und geben im Leben Halt – genauso, wie Sie es brauchen.



DIE THERALINE WOHLFÜHLGARANTIE

Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie schön und aufregend die Zeit der Schwangerschaft und die ersten Monate mit einem Baby sind. Wie wichtig manchmal Kleinigkeiten sind und dass am Ende immer das große Ganze zählt.

Seit nunmehr 30 Jahren geben wir unser Bestes, um jedes Jahr eine neue Generation von Müttern von uns und unseren Produkten zu überzeugen. Herausragende Stillkissenvielfalt, dazu ein vollkommen atemdurchlässiges Babykopfkissen, Kinderkopfkissen sowie Stilleinlagen aus Silikon, machen unser Programm unverwechselbar und spannend.

Ihre Sicherheit und lange Freude an der Nutzung sind für uns wirklich wichtig. An den vielen einzigartigen Produktdetails wird dies offensichtlich, aber manchmal machen auch fast unsichtbare Kleinigkeiten den Unterschied. Ganz egal ob im guten Fachgeschäft, Katalog oder Online: Von der Marke Theraline finden Sie immer ein ausgereiftes und sinnvolles Produkt mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis.

Wenn dennoch einmal etwas schiefgeht, egal ob bei der Lieferung oder selbst nach Jahren am Produkt, können Sie auf unsere großzügige Wohlfühlgarantie und beste Beratung zählen.

Werden Sie mit uns zusammen Ihr eigener Spezialist für ausgewählte Stoffqualitäten und Kissenfüllstoffe, für Formen und Funktionen, für Schadstofffreiheit und Sicherheit im Babybett.

Wir wünschen Ihnen von Herzen viel Freude beim Informieren und Auswählen!

Ihr Theraline Team

GESUNDE & SICHERE PRODUKTE

Darauf können Sie sich verlassen: Die Schadstofffreiheit aller verwendeten Füll- und Bezugsstoffe und eine hundertprozentige Produktsicherheit stehen für uns immer an erster Stelle. Die Theraline Schwangerschafts- & Stillkissen mit Perlenfüllung trugen deshalb seit 1998 das Toxproof®-Label des TÜV Rheinland. Seit Ende Juli 2021 wird nun das TÜV Rheinland Prüfsiegel durch das OEKO-TEX STANDARD 100-Siegel des Hohenstein Instituts ersetzt. Das bekannte Siegel gibt Ihnen die Sicherheit, ein garantiert gesundheitsverträgliches Produkt aus unserem Baby- oder Bettensortiment zu erwerben.




Sehr erfreulich ist auch, dass unser Original Theraline Stillkissen in fuchsia-cappuccino auch in 2016 und 2018 (in der Rubrik "Nebenwirkungen") vom Magazin Ökotest mit „sehr gut“ bewertet wurde.

FREUDE AM SCHÖNEN

Egal, ob besonders farbechter Feinköper, kuscheliger Jersey oder nachhaltige Bambus-Viskose: Alle Theraline-Stoffe sind hochwertig und fühlen sich richtig gut an. Denn sie werden aus außergewöhnlich weicher Baumwolle oder Bambusfaser gefertigt. Mercerisierung und besonders farbechte Drucke verleihen einen feinen Glanz. Dank langjähriger Erfahrung stimmt auch die Verarbeitung bis ins kleinste Detail.

GEBRAUCHSANLEITUNG UND PFLEGE

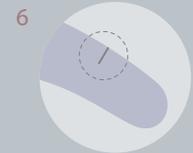

IN DER SCHWANGERSCHAFT . . .

. . . helfen sie Ihrem Körper, die richtige Entspannungslage zu finden. Wenn in den letzten Monaten der Schwangerschaft der Bauch immer größer wird, ist es oft schwierig, entspannt zu liegen. Die Bauchlage ist meist nicht mehr möglich und in der Rückenlage kann es sogar vorkommen, dass Ihr ungeborenes Kind nicht optimal mit Blut versorgt wird. Ob in der Nacht oder einfach zum Ausruhen zwischendurch: Das große Original Theraline Schwangerschafts- & Stillkissen stabilisiert zuverlässig die Seitenlage Ihres Körpers.

Dabei können Sie das Kissen sowohl von vorne als auch von hinten herum anlegen (Abb. 1 u. 3). Durch die Unterstützung der Beine und des Bauches entlasten Sie Ihre Wirbelsäule und können so entspannt und ruhig schlafen. Hinten herum angelegt, hilft es, ein ungewolltes Auf-den-Rücken-Rollen zu verhindern.

IN DER STILLZEIT . . .

. . . ist das Original Theraline Schwangerschafts- & Stillkissen ein idealer Begleiter. Gerade zu Beginn der Stillzeit treten häufig Beschwerden auf. Zu den häufigsten Problemen zählen Verspannungen der Schulter- und Nackenmuskulatur sowie wundte Brustwarzen, die meist als Folge von falschem Anlegen des Säuglings herrühren. Zudem ist der untere Rückenbereich durch die Schwangerschaft oft sehr belastet und für längere Zeit nach der Geburt noch sehr empfindlich.

Das Original Theraline Schwangerschafts- & Stillkissen ermöglicht Ihnen entspanntes Stillen durch wirkungsvolle Entlastung des Arm-, Schulter-, Nacken- und Rückenbereichs. Die anschmiegsame Perlenfüllung bietet eine sichere Auflage für Ihr Baby, egal, ob Sie bevorzugt im Sitzen oder im Liegen stillen. Zur Unterstützung im Rücken können Sie das Kissen in Hufeisenform von der Seite, von vorne oder hinten anlegen, je nachdem, wie es Ihnen am liebsten ist (Abb. 2 u. 5). Beim Stillen im Liegen wird das Kissen fast wie in der Schwangerschaft benutzt.

NACH DER STILLZEIT . . .

. . . ist Ihr Original Theraline Schwangerschafts- und Stillkissen ein wohltuender Helfer: Es eignet sich hervorragend zur Entspannung im Liegen, zum Hochlegen der Beine oder als Rückenunterstützung beim Fernsehen und Lesen. Es ist als Nestchen verwendbar oder unterstützt Ihr Baby bei den ersten Sitzübungen (Abb. 4).

DAS ORIGINAL THERALINE **SCHWANGERSCHAFTS- & STILLKISSEN** EIN BESONDERES KISSEN FÜR EINE GANZ BESONDERE ZEIT

FÜLLGRAD / NACHFÜLLEN

Alle Still- und Lagerungskissen werden von uns mit einer optimalen Füllmenge für eine angenehme und sichere Seitenlage versehen. Durch die bequeme Nachfüllöffnung am Inlett besteht dennoch die Möglichkeit etwas von der Füllung zu entnehmen, um z. B. zur direkten Verwendung als Stillkissen die Flexibilität Ihres Kissens zu erhöhen. Detaillierte Informationen zu den Füllgraden erhalten Sie auf www.theraline.de unter „Info & Service“.

Hierzu haben wir in das Kisseninlett eine selbstabdichtende Tunnelöffnung eingebracht. Diese befindet sich im unteren Drittel der Außennaht (Abb. 6). Rollen Sie nun ein beliebiges DIN A4 Blatt zu einem festen Röhrchen zusammen (Ø 1,5 cm) und führen Sie es dann von oben ca. 14 cm weit in die Tunnelöffnung ein. Wenn Sie nun das Kissen mit der Öffnung nach unten drehen, fließen die Perlen durch das Röhrchen und können in einem Beutel aufgefangen werden. Entnehmen Sie einfach so viel, bis Sie den für sich gewünschten Füllgrad erreicht haben. Natürlich können Sie das Kissen auf diese Weise auch wieder befüllen. Tipp: Am besten machen Sie dies draußen oder halten einen Staubsauger bereit, um evtl. ausgetretene Mikroperlen aufzusaugen.

WASCHBARKEIT

Inlett und Außenbezug sind bis 60 °C (die feinen Strickstoffe bis 40 °C) waschbar. Um Inlett und Bezug zu waschen, beachten Sie bitte unbedingt das angebrachte Etikett. Gewährleistungsansprüche verfallen, wenn das Kissen nicht mit Außenbezug benutzt oder gewaschen wird, da so bei einem

evtl. Defekt des Inletts ein Austreten der Kügelchen vermieden wird. Zudem sollte das Inlett vor der Wäsche sorgfältig auf „Undichtigkeiten“ bzw. Nahtfehler kontrolliert werden.

Tipp: Wer keinen ausreichend großen Wäschesack zur Hand hat, kann auch den Außenbezug hierfür benutzen. Bei neuen Bezügen und kräftigen Farben kann es während der Wäsche zu einem leichten Farbübergang auf das Inlett kommen, der die Nutzbarkeit aber nicht einschränkt.

Achtung: Wäschetrocknerbenutzung nur auf kleinster Stufe und mit ausreichend Bewegungsraum für Inlettkissen. Das Kissen muss sich in der Waschmaschine und im Trockner frei bewegen können. Nehmen Sie ggf. ausreichend Füllung heraus (siehe Kapitel Füllgrad/Nachfüllen). Insbesondere bei neueren Kissen wird es so auch einfacher, Ihr Kissen in die Waschmaschine zu legen.

Tipp: Außenbezüge auf links gedreht und mit geschlossenem Reißverschluss waschen (ca. 10 cm offen lassen). Nicht zusammen mit andersfarbiger Wäsche waschen oder trocknen.

DESINFEKTION

Wenn Sie die textilen Inlettkissen desinfizieren wollen, dann bitte nur Sprühdesinfektionsmittel benutzen. Mit Polyurethan beschichtete Inlettkissen und Außenbezüge sind mit allen herkömmlichen Desinfektionsmitteln behandelbar.

NACHFÜLLPACKUNGEN / GEWÄHRLEISTUNGS-AUSSCHLUSS

Bedingt durch die Eigenschaften von Baumwollgewebe und Polystyrol ist - in Abhängigkeit von

Art und Dauer der Beanspruchung - ein Volumenschwund normal. Ist von Ihnen ein höherer Füllgrad erwünscht, können Sie im Fachhandel oder direkt bei uns unter www.shop.theraline.de eine Nachfüllpackung inkl. Füllstutzen erwerben. Einen Anspruch auf kostenlosen Erhalt von Nachfüllmaterial müssen wir leider ausschließen.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Für Schäden durch ausgelaufenes Füllmaterial, die auf Waschen ohne hinreichend dichten Wäschesack (kein Netz!) oder zu wenig Bewegungsraum während des Wasch- oder Trocknungsvorganges zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

VORSICHT GEFAHR FÜR KINDER

- Plastikbeutel können zur tödlichen Falle werden. Halten Sie die Verpackung von Kindern fern.
- Kontrollieren Sie Ihr Stillkissen regelmäßig und vor dem ersten Gebrauch auf schadhafte Stellen und herausrieselnde Kügelchen. Kinder könnten diese evtl. verschlucken oder einatmen.
- Jedes Kissen kann für Säuglinge ein Erstickenrisiko darstellen: z. B. können Kissen im Schlaf über das Gesicht rutschen. Lassen Sie deshalb Ihr Baby auch mit dem Original Theraline Stillkissen nie für längere Zeit unbeobachtet.
- Eine Verwendung als Bettumrandung darf deshalb frühestens nach Vollendung des ersten Lebensjahres erfolgen.

THERALINE

Wir geben Leben Halt

Das
Original
THERALINE



Liebe Eltern,

wir danken Ihnen herzlich für den Kauf Ihres Original Theraline Stillkisses und freuen uns sehr über Ihr uns entgegengebrachtes Vertrauen.

Mit Deutschlands meistgeliebtem Stillkissen genießen Sie einen besseren Schlaf in der Schwangerschaft, entspannteres Stillen und erholsame Augenblicke in der oft anstrengenden Babyzeit beim Lesen, Kuscheln oder Fernsehen.

Das Original Theraline Schwangerschafts- und Stillkissen ist Ihr wunderbarer Begleiter für diese besondere Lebensphase – und noch lange darüber hinaus.

Ihr Theraline Team



97%*
der befragten
Hebammen
empfehlen
THERALINE
STILLKISSEN

* Die vollständige Umfrage aus 2017
finden Sie unter www.theraline.de/umfrage

DAS ORIGINAL THERALINE **SCHWANGERSCHAFTS- & STILLKISSEN** EIN BESONDERES KISSEN FÜR EINE GANZ BESONDERE ZEIT

PERLIGE THERALINE-HELDEN

Kennen Sie die „kleinen Helden“ der Theraline-Produktwelt? Es sind unsere sandfeinen, flüsterleisen Mikroperlen. Die frei fließenden Perlen geben Halt und Entlastung – ganz flexibel genau da, wo Sie oder Baby es brauchen.

Die einzigartige Füllung des Original Theraline Stillkissens sorgt für Entspannung beim Stillen des kleinen Liebling. In der Schwangerschaft gibt sie Babybauch, Armen und Beinen stabilen Halt, damit Sie bequem auf der Seite schlafen können. Geniale Kombi: Millionen sandfeiner, flüsterleiser Original Mikroperlen im Zusammenspiel mit dem perfekten Füllgrad des Kissens machen es flexibel und anschmiegsam. Gleichzeitig bietet es angenehme Unterstützung beim Schlafen & Stillen. Beruhigend, dass unsere Original Mikroperlen antiallergen, leicht waschbar, trocknergeeignet und selbstverständlich geruchs- und schadstofffrei sind.

HÖCHSTE QUALITÄT & LANGLEBIGKEIT

- Besonders farbechte, kuschelige und nachhaltige Stoffqualitäten
- Bezüge in vielen, schönen Dessins & Farben
- Flauschig-geschmeidig & extra strapazierfähig
- Leicht zu beziehen durch langen, verdeckten Reißverschluss
- Geräuscharme Original Mikroperlenfüllung
- Dank Tunnelöffnung bequem und einfach nachfüllbar
- Selbstverständlich geruchs- & schadstofffrei

BUNTE VIELFALT

Neu:

Unsere anschmiegsamen Feinstrickstoffe

Das feine Strickmuster in modernen, nordischen Farben verleiht dem spürbar hochwertigen Strickstoff eine füllig-weiche Oberfläche. Soft und kuschelig aus 100 % Baumwolle.

Unsere Bezüge & Dessins

Die Bezüge für Das Original Theraline gibt es in

- samtweicher Feinkörperqualität
- feinem Jersey, auch aus Bio-Baumwolle
- besonders nachhaltiger Bambus-Viskose mit Bio-Baumwolle
- und ganz neu: in kuscheligem Feinstrick aus 100 % Baumwolle

Die Knistertiere

Tolle Applikationen mit Knistereffekt für Babys Entdeckungsreise. Richtig süß.



PRODUKTINFORMATION

Material

Bezug: 100 % Baumwolle *oder*
57 % Viskose aus Bambusfasern, 38 % Baumwolle (Bio),
5 % Elasthan

Inlett: 100 % Baumwolle, vorgeschumpft

Füllung: Polystyrol (Mikroperlen, ca. 42 Liter, 25 g/l),
alternative Füllungen: Dinkel, Polyesterhohlfaser



Pflege

40/60 °C Schonwaschgang, im geschlossenen
Wäschesack, trocknergeeignet.

Waschhinweise Bezug



Waschhinweise Inlett

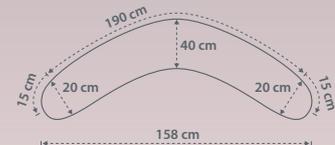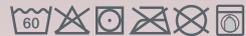

TESTERGEBNISSE IM ÖKOTEST-MAGAZIN

sehr gut ✓

- z. B. Original Theraline Stillkissen fuchsia-cappuccino
Rubrik „Nachwirkungen“ (Ausgabe 01/2018)
- z. B. Original Theraline Stillkissen mit Mikroperlenfüllung
(Ausgabe 01/2003)

Schadstofffreiheit seit 1993

KLIMANEUTRALES PRODUKT



CO₂-Emissionen durch
Herstellung & Vertrieb sind
komplett ausgeglichen

Neugierig auf noch mehr
schöne Dessins & Farben?
Schauen Sie auf
www.theraline.de

THERALINE

Yinnie


STILLEN SMART & EASY

- Handliche Form
- Flexibler Halt durch feinste Mikroperlenfüllung
- Original Theraline Qualität
- Geprüfte Schadstofffreiheit
- Samtweiche, hochwertige Feinkörperbezüge

Yinnie, das ist unbeschwertes Stillen pur in Anlehnung an die harmonische Energie von Yin und Yang. Dafür sorgt nicht nur die charakteristische Yin-Form mit super bequemer Liegefläche fürs Baby. Seine besondere Festigkeit und Formstabilität machen Yinnie so besonders: Der dichte Füllgrad mit den Original Theraline Mikroperlen lässt praktisch nichts verrutschen und gibt dem Säugling beim Stillen auf Mamas Schoß zuverlässigen Halt.



PRODUKTINFORMATION

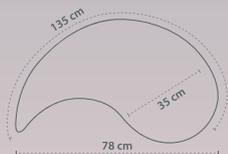

Material

Bezug & Inlett: 100 % Baumwolle

Füllung: Polystyrol (Mikroperlen, ca. 18 Liter, 25 g/l)

Pflege

Bezug & Inlett: 60 °C Schonwaschgang im geschlossenen Wäschesack, trocknergeeignet

Weitere schöne Dessins auf shop.theraline.de




Der Plüschmond

KUSCHEL- & STILLKISSEN

ZUM TRÄUMEN SCHÖN

- Bequemes Kopf- & Nackenkissen
- Kuscheliges Schmuse- & Lesekissen
- Handliches Bauchstütz- & Stillkissen
- Samtiger Frotteeplüsch & seidiger Stretch
- Feinste Mikroperlenfüllung
- Geruchs- & schadstofffrei

PRODUKTINFORMATION

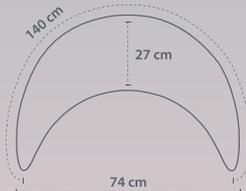

Material

Stretchstoff (90 % Nylon, 10 % Elasthan) und Plüsch (85 % Polyester, 15 % Polyamid)

Füllung: Polystyrol (Mikroperlen, ca. 18 Liter, 25 g/l)

Besonderheiten

Frotteeplüsch-Elasthan-Kombi, mit Nachfüllöffnung

Pflege

40 °C Schonwaschgang im geschlossenen Wäschesack, trocknergeeignet

Neu!

Der Bambusmond

MIT ABNEHMBAREM BEZUG AUS BAMBUS-VISKOSE MIT BIO-BAUMWOLLE

PRODUKTINFORMATION

Material

Bezug: 57 % Viskose aus Bambusfasern, 38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan

Inlett: 100 % Baumwolle

Inlett darf nicht ohne Außenbezug verwendet werden!

Füllung: Polystyrol (Mikroperlen, ca. 18 Liter, 25 g/l)

Pflege

40/60 °C Schonwaschgang im geschlossenen Wäschesack, trocknergeeignet



MÄRCHENHAFT ANSCHMIEGSAM & VIELSEITIG

Ob als bequemes Kopf- & Nackenkissen oder einfach zum Reinkuscheln beim Lesen oder Fernsehen auf dem Sofa: Der Theraline Plüschmond bereitet Ihnen entspannte Wohlfühlmomente. Und natürlich ist der Plüschmond auch ein Garant für entspanntes Stillen zwischendurch oder unterwegs.

Dank der genialen Mondform liegt Ihr Kopf einfach immer richtig – ganz egal, ob für kurze Momente der Entspannung oder für einen erholsamen Schlaf.



THERALINE

Das Babykopfkissen

PRÄVENTION & REGENERATION -
MIT SICHERHEIT

SCHÜTZEN SIE IHR BABY RECHTZEITIG

Ärzte empfehlen aus gutem Grund, Babys auf dem Rücken zu betten. Das Köpfchen Ihres Babys ist direkt nach der Geburt besonders weich und damit anfälliger für Kopfverformungen. Woche für Woche wird das Köpfchen dann kontinuierlich stabiler. Nach 4-5 Monaten stellt sich deshalb nur noch in einzelnen Fällen eine Kopfverformung ganz neu ein. Unglücklicherweise verhärten sich in dieser Zeit aber auch bereits entstandene Verformungen und es kann einige Zeit dauern, bis diese sich verwachsen.

PRODUKTINFORMATION

Maße

Größe 1: ca. 21 cm x 20 cm,
ca. 3 cm hoch
Größe 2: ca. 24,5 cm x 23 cm,
ca. 5 cm hoch

Material

96 % Polyester / 4 % Baumwolle

Pflege

waschbar bis 60 °C



ERGONOMISCH & BEQUEM

Das ergonomisch geformte High-Tech Abstandsgewebe unserer Theraline Babykopfkissen sorgt für effektive Unterstützung und ist bei maximaler Sicherheit ausgesprochen bequem für Ihr Baby. Das Oberflächengewebe ist besonders hautfreundlich und angenehm. Ihr Baby wird es genießen!

Größe 1 (bis ca. 7 kg)

PRÄVENTION & SICHERHEIT*

- Hilft, Verformungen zu verhindern
- Unterstützt deren schnellere Rückbildung
- Höchste Sicherheit durch komplett atemdurchlässiges 3D-Abstandsgewebe ohne Bezug
- Weiche und besonders hautfreundliche Oberseite
- Ergonomische und komfortable Schlaflage
- Temperatenausgleichend und hygienisch



FREIE LUFTZIRKULATION
DURCH 3D-ABSTANDSGEWEBE

* Leider ist die Verwendung des Theraline Babykopfkissens allein nicht immer ausreichend wirksam. Bei allen Kopfverformungen sollten Sie einen Arzt zu Rate ziehen sowie weitere von ihm empfohlene Maßnahmen ergreifen.

DAS THERALINE **BABYKOPFKISSEN**
PRÄVENTION & REGENERATION – MIT SICHERHEIT

GANZ SICHER

So frei atemdurchlässig ist nur ein Kissen aus 100 % Abstandsgewebe: Sollte sich Ihr Baby beginnen zu drehen und mit dem Gesicht in die Kissenmulde geraten, kann es trotzdem weiter frei atmen. Dies bietet so kein anderes Kissen.



Größe 2 (ab ca. 7 kg)

REGENERATION & SICHERHEIT*

- Unterstützt die Rückbildung von Verformungen
- Hilft, eine Verschlimmerung zu verhindern
- Höchste Sicherheit durch komplett atemdurchlässiges 3D-Abstandsgewebe ohne Bezug
- Weiche und besonders hautfreundliche Oberseite
- Leicht stabilisierende, ergonomische Form für eine heilungsfördernde und komfortable Schlaflage
- Temperatenausgleichend und hygienisch

Das Kinderkopfkissen

New!

SCHLAF- & NACKENSTÜTZKISSEN

GESUNDER HALT IN RÜCKEN- UND SEITENLAGE

- Stützt Nacken- und Schulterpartie optimal
- Bettet den Kopf immer auf der richtigen Höhe
- Flexibel für Rücken- und Seitenlage
- Außenbezug aus Bambus-Viskose mit Bio-Baumwolle
- Ab ca. 2 - 7 Jahre

PRODUKTINFORMATION

Größe

ca. 50 x 32 cm, ca. 7 cm hoch

Material

Bezug: 57 % Viskose aus Bambusfasern,
38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan

Inlett: 87 % Baumwolle / 13 % Elasthan

Füllung: Polystyrol (Mikroperlen, ca. 80 g/l)

Schaumstoffkern (Polyurethan)


Pflege

60 °C Schonwaschgang im geschlossenen
Wäschesack, trocknergeeignet, Schaumstoffkern
vor dem Waschen herausnehmen

SCHÖN GETRÄUMT & FRÖHLICH AUFGEWACHT

Gerade unsere Kleinen müssen ausreichend und gesund schlafen, damit sie den Herausforderungen des Lebens ausgeruht und fröhlich begegnen können. Daher ist es für unsere Kinder besonders wichtig, auf einem ergonomisch geeigneten Kopfkissen zu schlafen.

Wir bei Theraline haben es uns daher mit unserer 30 Jahre langen Erfahrung im Stillkissen- und Babykopfkissen-Bereich zur Aufgabe gemacht, ein Kinderkopfkissen zu entwickeln, das unseren Kleinen bequemen Halt gibt, damit sie gut & gesund schlafen und fröhlich & erholt aufwachen.

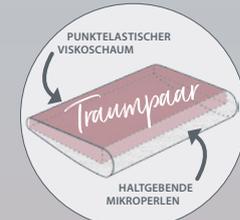

PERFEKTE SYMBOSE

- Hunderttausende feine Mikroperlen sorgen für Stabilität.
- Die obere Schicht aus hochwertigem, punkt-elastischem Viskoschaum nimmt den Kinderkopf sanft und bequem auf.
- Die Innenhülle aus dehnbarem Baumwoll-Elasthan-Gemisch lässt den untenliegenden Mikroperlen genügend Raum, um sich flexibel in die optimale Position zu bewegen.



THERALINE


Das Nacken- kissen

ENTSPANNUNG FÜR GROSS & KLEIN

- Perfekt als Reiseschlafkissen
- Hält Ihr Baby in Seiten- oder Rückenlage stabil
- Abnehmbarer Bezug
- Sandfeine, anschmiegsame Mikroperlenfüllung
- Geruchs- & schadstofffrei

Nackenkissen von Theraline sind eine ideale Kombination aus Reise- und Schlafkissen, gefüllt mit feinsten Mikroperlen für gefahrlose Anwendung im Auto. Es gibt sie in vielen verschiedenen Varianten für Groß und Klein und von einfach & funktional bis zur kuscheligen Schäfchenausführung.

PRODUKTINFORMATION

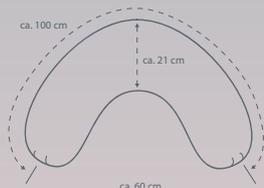

Material
Bezug: 100 % Baumwolle **oder**
57 % Viskose aus Bambusfasern,
38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan

Inlett: 100 % Baumwolle

Füllung: Polystyrol
(Mikroperlen, ca. 25 g/l)

Pflege

60 °C Schonwaschgang
im geschlossenen Wäschesack,
trocknergeeignet

— ♥ —
In vielen
unterschiedlichen
Formen und Farben auf
shop.thermaline.de



Kirschkerneissen

IMMER DIE PERFEKTE TEMPERATUR

- Sanfte Wärme und Kühlung
- Mikrowellengeeignet
- Lange Temperaturspeicherung
- Für Klein und Groß



DIE KERNIGEN HELFERLEIN

Schon vor mehr als 100 Jahren war dieses kernige Helferlein ein beliebtes Hausmittel. In der Schwangerschaft unterstützt eine wohlthuende trockene Wärme die Entspannung des oft sehr belasteten unteren Rückens und Steißbeins. Kirschkerneissen werden einfach für kurze Zeit in der Mikrowelle erwärmt und schon hält die Wärme für lange Zeit. Doch auch, wenn später Babys Bauch unter Schmerzen leidet, werden Kirschkerneissen als „Geheimtipp“ gehandelt. Aber der Nutzen geht noch weiter: Zum Beispiel beim Zahnen können Kirschkerneissen durch Kühlung lindern.

Baby-Tröste-Tiere

OH, WIE SCHÖN RASCHELT UND KNIRSCHT DENN DAS?

Die lustigen Baby-Tröste-Tiere von Theraline sind mit mehrfach gereinigten Kirschkernen zur sanften Erwärmung oder Kühlung gefüllt, wenn das Bäuchlein mal drückt oder der böse Zahn nicht aufhören will, weh zu tun. Ideal für den kleinen Heilzauber zwischendurch, für Babys und bis weit ins Kleinkindalter hinein. Toll für Medizinfrauen: Es lässt sich in Sekunden ganz leicht erwärmen!



THERALINE

Das Kopfkissen

Neu!

SCHLAF- & NACKENSTÜTZKISSEN

DIE SUCHE NACH DEM RICHTIGEN KOPFKISSEN HAT EIN ENDE

Haben Sie auch schon diverse Kissen ausprobiert und immer noch nicht das richtige gefunden?

Oft ist es eine wahre Odyssee, das perfekte Kopfkissen zu finden. Das eine Kissen ist zu weich - das andere zu fest. Weder Feder- noch Polyester- oder Polyurethanfüllungen waren die Lösung. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, ein Kopfkissen zu entwickeln, das Ihnen den bequemen Halt gibt, damit Sie gut und gesund schlafen und frisch und erholt aufwachen.


Die Lösung liegt im perfekten Zusammenspiel von 3 Komponenten:

- Hunderttausende feine Mikroperlen sorgen für Stabilität.
- Die obere Schicht aus hochwertigem, punktelastischem Viskoschaum nimmt Ihren Kopf sanft und bequem auf.
- Die Innenhülle aus dehnbarem Baumwoll-Elasthan-Gemisch lässt den untenliegenden Mikroperlen genügend Raum, um sich flexibel in die für Sie angenehme Richtung zu bewegen.



GESUNDER HALT IN RÜCKEN- UND SEITENLAGE

- stützt Nacken- und Schulterpartie optimal
- bettet den Kopf immer auf der richtigen Höhe
- ist flexibel für Rücken- und Seitenlage
- hat einen Außenbezug aus Bambus-Viskose mit Bio-Baumwolle

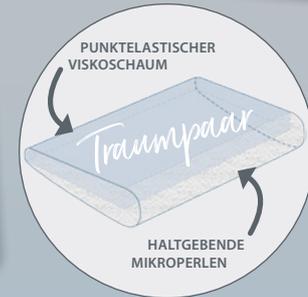

PRODUKTINFORMATION

Größe
ca. 50 x 32 cm, ca. 12 cm hoch

Material
Bezug: 57 % Viskose aus Bambusfasern,
38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan

Inlett: 87 % Baumwolle / 13 % Elasthan

Füllung: Polystyrol (Mikroperlen, ca. 80 g/l)
Schaumstoffkern (Polyurethan)

Pflege
60 °C Schonwaschgang im geschlossenen
Wäschesack, trocknergeeignet, Schaumstoff-
kern vor dem Waschen herausnehmen

Europäisches
Patent
Nr. 3192400

KLIMANEUTRALES
PRODUKT



CO₂-Emissionen durch
Herstellung & Vertrieb sind
komplett ausgeglichen

THERALINE

Wir geben Leben Halt

www.theraline.de

THERALINE eK
Industriepark Nord 56 · D-53567 Buchholz Ww.
Tel.: 02683 96960 Mail: info@theraline.de