

30
JAHRE
THERALINE

Wir geben Leben Halt
SEIT 1993

THERALINE

Wir geben Leben Halt

Yinnie

**GEBRAUCHSANLEITUNG
UND PRODUKTINFORMATIONEN**



The background of the advertisement is a soft-focus photograph of a baby being held in a woman's arms. The baby is lying down, and the woman's hands are visible, gently supporting the child. The overall tone is warm and intimate. In the lower-left quadrant, there is a graphic illustration of a white pearl resting inside a grey, shell-like structure. The shell is filled with small white beads, representing the 'micropearls' mentioned in the text. The pearl itself is a single, larger white sphere.

Wir geben Leben Halt

Wenn Sie unsere Perlenkissen einmal ausprobieren, spüren Sie eines sofort: sie geben Ihnen oder Ihren Lieben Halt, wie kein anderes Kissen. Dabei kommen unsere kleinen Theraline-„Helden“ ganz groß raus: unsere sandfeinen, flüsterleisen Mikroperlen.

Egal ob groß oder klein, schwanger oder stillend oder ob Sie unsere Kissen einfach nur zum Schlafen nehmen, die Theraline-Kissen formen sich dank der frei fließenden, schadstofffreien Perlen immer optimal an und geben im Leben Halt – genauso, wie Sie es brauchen.



DIE THERALINE WOHLFÜHLGARANTIE

Aus eigener Erfahrung wissen wir, wie schön und aufregend die Zeit der Schwangerschaft und die ersten Monate mit einem Baby sind. Wie wichtig manchmal Kleinigkeiten sind und dass am Ende immer das große Ganze zählt.

Seit nunmehr 30 Jahren geben wir unser Bestes, um jedes Jahr eine neue Generation von Müttern von uns und unseren Produkten zu überzeugen. Herausragende Stillkissenvielfalt, dazu ein vollkommen atemdurchlässiges Kopfkissen, Kinderkopfkissen sowie Stilleinlagen aus Silikon, machen unser Programm unverwechselbar und spannend.

Ihre Sicherheit und lange Freude an der Nutzung sind für uns wirklich wichtig. An den vielen einzigartigen Produktdetails wird dies offensichtlich, aber manchmal machen auch fast unsichtbare Kleinigkeiten den Unterschied. Ganz egal ob im guten Fachgeschäft, Katalog oder Online: Von der Marke Theraline finden Sie immer ein ausgereiftes und sinnvolles Produkt mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis.

Wenn dennoch einmal etwas schiefgeht, egal ob bei der Lieferung oder selbst nach Jahren am Produkt, können Sie auf unsere großzügige Wohlfühlgarantie und beste Beratung zählen.

Werden Sie mit uns zusammen Ihr eigener Spezialist für ausgewählte Stoffqualitäten und Kissenfüllstoffe, für Formen und Funktionen, für Schadstofffreiheit und Sicherheit im Babybett.

Wir wünschen Ihnen von Herzen viel Freude beim Informieren und Auswählen!

Ihr Theraline Team

GESUNDE & SICHERE PRODUKTE

Darauf können Sie sich verlassen: Die Schadstofffreiheit aller verwendeten Füll- und Bezugstoffe und eine hundertprozentige Produktsicherheit stehen für uns immer an erster Stelle. Die Theraline Schwangerschafts- & Stillkissen mit Perlenfüllung trugen deshalb seit 1998 das Toxproof®-Label des TÜV-Rheinland. Seit Ende Juli 2021 wird nun das TÜV Rheinland Prüfsiegel durch das OEKO-TEX STANDARD 100-Siegel des Hohenstein Instituts ersetzt. Das bekannte Siegel gibt Ihnen die Sicherheit, ein garantiert gesundheitsverträgliches Produkt aus unserem Baby- oder Bettensortiment zu erwerben.



Sehr erfreulich ist auch, dass unser Original Theraline Stillkissen in fuchsia-cappuccino auch in 2016 und 2018 (in der Rubrik "Nebenwirkungen") vom Magazin Ökotest mit „sehr gut“ bewertet wurde.

FREUDE AM SCHÖNEN

Egal, ob besonders farbechter Feinkörper, kuscheliger Jersey oder nachhaltiger Bambus-Jersey: Alle Theraline Stoffe fühlen sich hochwertig und richtig gut an. Denn sie werden aus außergewöhnlich weicher Baumwolle gefertigt. Mercerisierung und besonders farbechte Drucke verleihen einem feinen Glanz. Dank langjähriger Erfahrung stimmt auch die Verarbeitung bis ins kleinste Detail.

THERALINE

Yinnie GEBRAUCHSANLEITUNG & PFLEGEHINWEISE

FÜLLGRAD / NACHFÜLLEN

Alle Schwangerschafts- & Stillkissen werden von uns mit einer optimalen Füllmenge versehen. Durch die bequeme Nachfüllöffnung am Inlett besteht dennoch die Möglichkeit, etwas von der Füllung zu entnehmen, um z. B. zur direkten Verwendung als Stillkissen die Flexibilität Ihres Kissens zu erhöhen. Detaillierte Informationen zu den Füllgraden erhalten Sie auf www.thermaline.de unter „Info & Service“. Hierzu haben wir in das Kisseninlett eine selbstabdichtende Tunnelöffnung eingebracht. Diese befindet sich gegenüber der Waschetiketten an der Außennaht. Rollen Sie nun ein beliebiges DIN A4 Blatt zu einem festen Röhrchen zusammen (Ø 1,5 cm) und führen es dann von oben ca. 14 cm weit in die Tunnelöffnung ein. Wenn Sie nun das Kissen mit der Öffnung nach unten drehen, fließen die Perlen durch das Röhrchen und können in einem Beutel aufgefangen werden. Entnehmen Sie einfach so viel, bis Sie den für sich gewünschten Füllgrad erreicht haben. Natürlich können Sie das Kissen auf diese Weise auch wieder befüllen. Tipp: Am besten machen Sie dies draußen oder halten einen Staubsauger bereit, um evtl. ausgetretene Mikroperlen aufzusaugen.

WASCHBARKEIT

Außenbezug und Inlett sind aus 100 % Baumwolle, bis 60 °C waschbar und trocknergeeignet. Bitte jedoch nur Schonwaschen bzw. Schontrocknen. Um das Inlett oder den Bezug zu waschen, beachten Sie bitte unbedingt die am Etikett angebrachten Warnhinweise.

Warnhinweis: Durch hohe Schleuderzahlen kann

Ihr Kissen in der Waschmaschine reißen. Ein Austreten der Füllung kann dann die Waschmaschine oder den Trockner beschädigen oder viel Arbeit verursachen! Waschen und Trocknen deshalb immer nur im Wäschesack und in Maschinen, in denen sich das Kissen frei bewegen kann.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Haftungsansprüche verfallen, wenn das Kissen nicht mit Außenbezug benutzt oder in einem Wäschesack gewaschen wird, da nur so bei einem evtl. Defekt des Inletts ein Austreten der Kügelchen vermieden werden kann. Sicherheitshalber sollte das Inlett vor der Wäsche auch sorgfältig auf „Undichtigkeiten“ bzw. Nahtfehler kontrolliert werden. Das Kissen muss sich in der Waschmaschine und im Trockner frei bewegen und beim Schleudern vollständig der Trommel anpassen können. Nehmen Sie ggf. ausreichend Füllung heraus (siehe Kapitel Füllgrad / Nachfüllen). Insbesondere bei neueren Kissen wird es so auch einfacher, Ihr Kissen in die Waschmaschine zu legen. **Achtung:** Ein zu volles Kissen kann auch bei geringen Schleuderzahlen reißen.

Tipp: Wer keinen ausreichend großen Wäschesack zur Hand hat, kann auch den Außenbezug hierfür benutzen. Bei neuen Bezügen und kräftigen Farben kann es aber während der Wäsche zu einem Farbübergang auf das Inlett kommen, der die Nutzbarkeit jedoch nicht einschränkt, weshalb wir hierfür auch keine Haftung übernehmen.

Tipp: Außenbezüge auf links gedreht und mit geschlossenem Reißverschluss waschen (ca. 10 cm offen lassen). Nicht zusammen mit andersfarbiger

Wäsche waschen oder trocknen.

Desinfektion: Verwenden Sie bei textilen Inlettkissen nur Sprühdeseinfektionsmittel.

NACHFÜLLPACKUNGEN / GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

Bedingt durch die Eigenschaften von Baumwollgewebe und Polystyrol ist - in Abhängigkeit von Art und Dauer der Beanspruchung - ein Volumenschwund normal. Ist von Ihnen ein höherer Füllgrad erwünscht, können Sie im Fachhandel oder direkt bei uns unter www.shop.thermaline.de eine Nachfüllpackung inkl. Füllstutzen erwerben. Einen Anspruch auf kostenlosen Erhalt von Nachfüllmaterial müssen wir leider ausschließen.

VORSICHT GEFAHR FÜR KINDER

- Halten Sie die Verpackung von Kindern fern.
- Plastikbeutel können zur tödlichen Falle für Kinder werden.
- Kontrollieren Sie Ihr Stillkissen regelmäßig und vor dem ersten Gebrauch auf schadhafte Stellen und herausrieselnde Kügelchen. Kinder könnten diese evtl. verschlucken oder einatmen.
- Jedes Kissen kann für Säuglinge ein Erstickungsrisiko darstellen: z. B. können Kissen im Schlaf über das Gesicht rutschen. Lassen Sie deshalb Ihr Baby mit dem Stillkissen nie für längere Zeit unbeobachtet.


Sehen Sie sich hier die Anleitung zum Nachfüllen an:



STILLEN SMART & EASY

- Handliche Form
- Stabiler Halt durch feinste Mikroperlenfüllung
- Original Theraline Qualität
- Geprüfte Schadstofffreiheit
- Samtweiche, hochwertige Feinkörperbezüge

PRODUKTINFORMATION

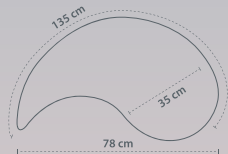

Material

Bezug & Inlett: 100 % Baumwolle
Füllung: Polystyrol (Mikroperlen, ca. 18 Liter, 25 g/l)

Pflege

Bezug & Inlett: 60 °C Schonwaschung im geschlossenen Wäschesack, trocknergeeignet

Waschhinweise Bezug



Waschhinweise Inlett



WOHLFÜHLEN À LA YIN UND YANG

Yinnie, das ist unbeschwertes Stillen pur in Anlehnung an die harmonische Energie von Yin und Yang. Dafür sorgt nicht nur die charakteristische Yin-Form mit super bequemer Liegefläche fürs Baby. Seine besondere Festigkeit und Formstabilität machen Yinnie so besonders: Der dichte Füllgrad mit den Original Theraline Mikroperlen lässt praktisch nichts verrutschen und gibt dem Säugling beim Stillen auf Mamas Schoß zuverlässigen Halt.



Weitere schöne Dessins
finden Sie hier:



THERALINE



Das
Original
THERALINE

Das Original Theraline Schwangerschafts- und Stillkissen ist Ihr wunderbarer Begleiter für diese besondere Lebensphase – und noch lange darüber hinaus. Mit Deutschlands meistgeliebtem Stillkissen genießen Sie einen besseren Schlaf in der Schwangerschaft, entspannteres Stillen und erholsame Augenblicke in der oft anstrengenden Babyzeit beim Lesen, Kuscheln oder Fernsehen.

97%
der befragten
Hebammen
empfehlen
THERALINE
STILLKISSEN

* Die vollständige Umfrage aus 2017 finden Sie unter www.thermaline.de/umfrage



DAS ORIGINAL THERALINE SCHWANGERSCHAFTS- & STILLKISSEN EIN BESONDERES KISSEN FÜR EINE GANZ BESONDERE ZEIT

PERLIGE THERALINE-HELDEN

Kennen Sie die „kleinen Helden“ der Theraline-Produktwelt? Es sind unsere sandfeinen, flüsterleisen Mikroperlen. Die frei fließenden Perlen geben Halt und Entlastung – ganz flexibel genau da, wo Sie oder Baby es brauchen.

Die einzigartige Füllung des Original Theraline Stillkissens sorgt für Entspannung beim Stillen des kleinen Liebling. In der Schwangerschaft gibt sie Babybauch, Armen und Beinen stabilen Halt, damit Sie bequem auf der Seite schlafen können. Geniale Kombi: Millionen sandfeiner, flüsterleiser Original Mikroperlen im Zusammenspiel mit dem perfekten Füllgrad des Kissens machen es flexibel und anschmiegsam. Gleichzeitig bietet es angenehme Unterstützung beim Schlafen & Stillen. Beruhigend, dass unsere Original Mikroperlen antiallergen, leicht waschbar, trocknergeeignet und selbstverständlich geruchs- und schadstofffrei sind.

TESTERGEBNISSE IM ÖKOTEST-MAGAZIN

sehr gut ✓

- z. B. Original Theraline Stillkissen fuchsia-capoccino Rubin „Nachwirkungen“ (Ausgabe 01/2018)
- z. B. Original Theraline Stillkissen mit Mikroperlenfüllung (Ausgabe 01/2003)

Schadstofffreiheit seit 1993

KLIMANEUTRALES PRODUKT



CO₂-Emissionen durch Herstellung & Vertrieb sind komplett ausgeglichen

HÖCHSTE QUALITÄT & LANGLEBIGKEIT

- Besonders farbechte, kuschelige und nachhaltige Stoffqualitäten
- Bezüge in vielen, schönen Dessins & Farben
- Flauschig-geschmeidig & extra strapazierfähig
- Leicht zu beziehen durch langen, verdeckten Reißverschluss
- Geräuscharme Original Mikroperlenfüllung
- Dank Tunnelöffnung bequem und einfach nachfüllbar
- Selbstverständlich geruchs- & schadstofffrei

TREUER BEGLEITER IN SCHWANGERSCHAFT & STILLZEIT

- Deutschlands beliebtestes Stillkissen
- Stabiler Halt für besseren Schlaf in der Schwangerschaft
- Von Hebammen empfohlen
- Vielseitig einsetzbar für alle Stillpositionen
- Beugt Verspannungen in Schultern und Nacken vor

BUNTE VIELFALT

Neu:

Unsere anschmiegsamen Feinstrickstoffe

Das feine Strickmuster in modernen, nordischen Farben verleiht dem spürbar hochwertigen Strickstoff eine füllig-weiche Oberfläche. Soft und kuschelig aus 100 % Baumwolle.

Unsere Bezüge & Dessins:

Die Bezüge für Das Original Theraline gibt es in

- samtweicher Feinkörperqualität
- feinem Jersey, auch aus Bio-Baumwolle
- besonders nachhaltiger Bambus-Viskose mit Bio-Baumwolle
- und ganz neu: in kuscheligem Feinstrick aus 100% Baumwolle

Knistertiere:

Tolle Applikationen mit Knistereffekt für Babys Entdeckungsreise. Richtig süß.

PRODUKTINFORMATION

Material

Bezug: 100 % Baumwolle **oder**
57 % Viskose aus Bambusfasern,
38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan

Inlett: 100 % Baumwolle, vorgeschumpft


Füllung: Polystyrol
(Mikroperlen, ca. 42 Liter, 25 g/l)

Pflege

Bezug & Inlett: 60 °C Schonwaschgang im geschlossenen Wäschesack (für die feinen Strickstoffe wird 40 °C empfohlen), trocknergeeignet.



Neugierig auf noch mehr schöne Dessins & Farben?

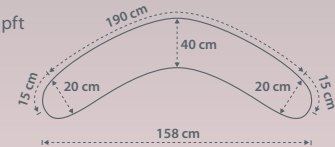

THERALINE

Das Babykopfkissen

SCHÜTZEN SIE IHR BABY RECHTZEITIG

Ärzte empfehlen aus gutem Grund, Babys auf dem Rücken zu betten. Das Köpfchen Ihres Babys ist direkt nach der Geburt besonders weich und damit anfälliger für Kopfverformungen. Woche für Woche wird das Köpfchen dann kontinuierlich stabiler. Nach 4-5 Monaten stellt sich deshalb nur noch in einzelnen Fällen eine Kopfverformung ganz neu ein. Unglücklicherweise verhärten sich in dieser Zeit aber auch bereits entstandene Verformungen und es kann einige Zeit dauern, bis diese sich verwachsen.

PRODUKTINFORMATION

Maße

Größe 1: ca. 21 cm x 20 cm,
ca. 3 cm hoch

Größe 2: ca. 24,5 cm x 23 cm,
ca. 5 cm hoch

Material

96 % Polyester / 4 % Baumwolle

Pflege

waschbar bis 60 °C

ERGONOMISCH & BEQUEM

Das ergonomisch geformte High-Tech Abstandsgewebe unserer Theraline Babykopfkissen sorgt für effektive Unterstützung und ist bei maximaler Sicherheit ausgesprochen bequem für Ihr Baby. Das Oberflächengewebe ist besonders hautfreundlich und angenehm. Ihr Baby wird es genießen!



Größe 1

PRÄVENTION & SICHERHEIT*

- Hilft, Verformungen zu verhindern
- Unterstützt deren schnellere Rückbildung
- Höchste Sicherheit durch komplett atemdurchlässiges 3D-Abstandsgewebe ohne Bezug
- Weiche und besonders hautfreundliche Oberseite
- Ergonomische und komfortable Schlaflage
- Temperatenausgleichend und hygienisch



FREIE LUFTZIRKULATION
DURCH 3D-ABSTANDSGEWEBE

* Leider ist die Verwendung des Theraline Babykopfkissens allein nicht immer ausreichend wirksam. Bei allen Kopfverformungen sollten Sie einen Arzt zu Rate ziehen sowie weitere von ihm empfohlene Maßnahmen ergreifen.

GANZ SICHER

So frei atemdurchlässig ist nur ein Kissen aus 100 % Abstandsgewebe:

Sollte Ihr Baby beginnen sich zu drehen und mit dem Gesicht in die Kissenmulde geraten, kann es trotzdem weiter frei atmen. Dies bietet so kein anderes Kissen.



Größe 2

REGENERATION & SICHERHEIT*

- Unterstützt die Rückbildung von Verformungen
- Hilft, eine Verschlimmerung zu verhindern
- Höchste Sicherheit durch komplett atemdurchlässiges 3D-Abstandsgewebe ohne Bezug
- Weiche und besonders hautfreundliche Oberseite
- Leicht stabilisierende, ergonomische Form für eine heilungsfördernde und komfortable Schlaflage
- Temperatenausgleichend und hygienisch

Neu!

Das Kinderkopfkissen

GESUNDER HALT IN RÜCKEN- UND SEITENLAGE

- Stützt Nacken- und Schulterpartie optimal
- Bettet den Kopf immer auf der richtigen Höhe
- Flexibel für Rücken- und Seitenlage
- Außenbezug aus Bambus-Viskose mit Bio-Baumwolle
- Ab ca. 2 - 7 Jahre

PRODUKTINFORMATION

Größe

ca. 50 x 32 cm, ca. 7 cm hoch

Material

Bezug: 57 % Viskose aus Bambusfasern,
38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan

Inlett: 87 % Baumwolle / 13 % Elasthan

Füllung: Polystyrol (Mikroperlen, ca. 80 g/l)
Schaumstoffkern (Polyurethan)


Pflege

Bezug & Inlett: 60 °C Schonwaschgang
im geschlossenen Wäschesack, trocknergeeignet

Schaumstoffkern nicht waschbar - vor der Wäsche
herausnehmen.

SCHÖN GETRÄUMT & FRÖHLICH AUFGEWACHT

Gerade unsere Kleinen müssen ausreichend und gesund schlafen, damit sie den Herausforderungen des Lebens ausgeruht und fröhlich begegnen können. Daher ist es für unsere Kinder besonders wichtig, auf einem ergonomisch geeigneten Kopfkissen zu schlafen. Wir bei Theraline haben es uns daher mit unserer über 25 Jahre langen Erfahrung im Stillkissen- und Babykopfkissen-Bereich zur Aufgabe gemacht, ein Kinderkopfkissen zu entwickeln, das unseren Kleinen bequemen Halt gibt, damit sie gut & gesund schlafen und fröhlich & erholt aufwachen.

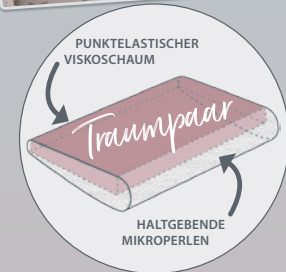

PERFЕКTE SYMBIOSE

- Hunderttausende feine Mikroperlen sorgen für Stabilität.
- Die obere Schicht aus hochwertigem, punkt-elastischem Viskoschaum nimmt den Kinderkopf sanft und bequem auf.
- Die Innenhülle aus dehnbarem Baumwoll-Gemisch mit Elasthan lässt den untenliegenden Mikroperlen genügend Raum, um sich flexibel in die optimale Position zu bewegen.



THERALINE

Mamma Pads

MEHR FREUDE AM STILLEN

- Verhindert durch sanften Druck das Auslaufen der Muttermilch
- Nicht absorbierend
- Atmungsaktiv und hautfreundlich
- Sparsam, für ca. 150-200 Anwendungen*
- Angenehmer Tragekomfort
- Ohne BH schlafen und ausgehen
- Nicht sichtbar z. B. unter T-Shirt, Abendkleid oder Badeanzug

PRODUKTINFORMATION

Maße

Ø ca. 9 cm, Stärke ca. 2,7 mm

Material

ultrareines, medizinisches Silikon

Besonderheiten

schadstofffrei, atmungsaktiv, hauchdünne Haftschrift

Pflege

abwaschbar, kochbar

Querschnitt durch einen Mamma Pad

Mamma Pad

Stärke: ca. 2,7 mm

Haftschrift

Stärke: > 0,1 mm

NUTZT EINEN NATÜRLICHEN KÖRPERREFLEX

Die Mamma Pads sind atmungsaktive Stilleinlagen aus hautfreundlichem Silikon, die einen natürlichen Körperreflex nutzen: Durch fast unmerklichen Druck auf die Brustwarzen verhindern sie zuverlässig das Auslaufen wertvoller Muttermilch in den Stillpausen. Ab jetzt bekommt Ihr Baby die ganze, gute Milch. Und Sie dürfen sich freuen, dass Bluse oder T-Shirt trocken und fleckenfrei bleiben.

NEUE FREIHEITEN GENIESSEN

Weil die Mamma Pads keine Feuchtigkeit absorbieren müssen wie klassische Stilleinlagen, sind sie wirklich hauchdünn. Das macht sie nahezu unsichtbar, selbst bei körperbetonter Kleidung oder transparenten Dessous. Eine echte Befreiung: Mit den Theraline Mamma Pads können Sie nachts wieder ohne BH schlafen – und das ganz sicher.

Super praktisch: Einmal angelegt, haften die Mamma Pads zuverlässig ohne Verrutschen – prima beim Joggen mit der Freundin oder beim Babyschwimmen.



DIE THERALINE MAMMA PADS DIE CLEVERE STILLEINLAGE



SPAREN UND SCHÜTZEN

Bei korrekter Pflege lassen sich die Mamma Pads über 150 mal wiederverwenden*. Das freut nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern schützt auch unsere wertvolle Umwelt.

SANFT UND SICHER

Die blütenförmigen Silikon-Stilleinlagen passen sich wie eine zweite Haut praktisch jeder Brustform und -größe an. Eine hauchdünne, medizinische Haftschiicht auf der Innenseite der Pads sorgt Tag und Nacht für perfekten Halt und Sicherheit. Ultrareine, atmungsaktive Silikone garantieren einen Tragekomfort, der dem natürlichen Hautgefühl so nahe kommt, dass Sie glatt vergessen könnten, überhaupt Stillpads zu tragen.



TIPPS FÜR DIE ANWENDUNG

Die besten Erfahrungen mit den Mamma Pads machen Frauen mit gut ausgeprägten Brustwarzen und einem normalen Milchdruck - und das schon ab der 2. bis 6. Lebenswoche des Babys. Viele Mütter nutzen die Silikon-Stilleinlagen besonders begeistert in der Abstillzeit. Bei sehr kleinen Brustwarzen oder hohem Milchdruck zu Beginn der Stillzeit empfehlen sich manchmal eher herkömmliche Marken-Stilleinlagen.

Am besten, Sie machen Ihren persönlichen Mamma Pads-Test. Und sollte es nicht klappen, probieren Sie es einfach zu einem späteren Zeitpunkt wieder.**

Mehr interessante Informationen zu Anwendung und Pflege erhalten Sie auf www.theraline.de.

* Die Pads einfach nach jeder Nutzung mit warmem Wasser und nicht rückfettender Seife reinigen, dann an der Luft trocknen lassen. Stark kalkhaltiges Wasser oder häufiges Trocknen in staubiger Umgebung können die Lebensdauer der Mamma Pads verkürzen.

** Weil die Mamma Pads manchmal aufgrund körperlicher Gegebenheiten nicht optimal funktionieren, geben wir eine Zufriedenheitsgarantie: Sollten Sie das Produkt zurückgeben wollen, erstattet der Handel Ihnen auch bei bereits benutzten Pads den vollen Kaufpreis.

THERALINE

Wir geben Leben Halt

Liebe Eltern,

wir danken Ihnen herzlich für den Kauf Ihres Yinnie Stillkissens und freuen uns sehr über Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

Seit vielen Jahren steht Theraline als Synonym für beste Qualität bei Stillkissen. Einen guten Ruf, den wir uns auch mit Ihrem Stillkissen wieder neu verdienen wollen. Deshalb verwenden wir für unser Yinnie nur feinste und gesundheitlich vollständig unbedenkliche Original Mikroperlen. Wie die Hersteller edler Bettwäsche verwenden wir nur beste Stoffqualitäten

und besonders farbechte und schadstofffreie Druckverfahren.

Materialien, die Sie in vielen Nächten während Ihrer Schwangerschaft bei einem besseren Schlaf begleiten und die gemacht sind, um der weichen Haut Ihres Säuglings zu schmeicheln.

Wir wünschen Ihnen von Herzen viele glückliche Stunden und freuen uns über jeden Moment, in dem Ihr Yinnie Stillkissen dabei eine sichere und bequeme Unterstützung ist.

Ihr Theraline-Team

THERALINE eK
Industriepark Nord 56 · D-53567 Buchholz Ww.
Tel.: +49(0)2683-96 96 0 Mail: info@theraline.de

www.theraline.de

